

# Flexima<sup>®</sup> 3S

Le système deux pièces à couplage mécanique le plus flexible



Fiche d'instructions



# Flexima<sup>®</sup> 3S

## Fiche d'instructions

Flexima<sup>®</sup> 3S : le système deux pièces à couplage mécanique le plus flexible avec guide de positionnement intégré exclusif pour une mise en place aisée et correcte de la poche sur le support cutané.

Flexima<sup>®</sup> 3S se compose de :

- Un support cutané souple avec système de guidage (serrure) pour un positionnement précis et une bonne fixation de la poche.
- Une poche collectrice avec languette de positionnement intégrée (clé) pour fixer aisément et solidement la poche sur le support cutané.

**Préparation du matériel :**

- Découper le support cutané à dimension de la stomie. Le support cutané ne doit pas léser la stomie ! Il convient donc de découper dans le support cutané une ouverture de dimension légèrement supérieure à celle de la stomie.

**Préparation de la peau autour de la stomie :**

- Nettoyer la peau autour de la stomie à l'eau tiède et la sécher soigneusement. Ne pas utiliser d'alcool, d'éther ou de tout autre désinfectant !

**Mise en place du support cutané :**

- Retirer le feuillet protecteur du support cutané.
- Appliquer le support cutané au niveau de la stomie en veillant à placer le guide de positionnement (serrure) vers le bas.
- Faites soigneusement adhérer le support cutané en exerçant une pression depuis la stomie vers le bord externe.

**Mise en place de la poche :**

- Glisser la languette (clé) de la poche dans le guide de positionnement (serrure) du support cutané. ①
- Presser fermement la face inférieure de l'anneau de la poche pour le faire adhérer à l'anneau du support cutané.
- Verrouiller le couplage à l'aide des boutons de sécurité sur le haut du support. ②
- Fixer ensuite les deux anneaux l'un contre l'autre en exerçant une pression vers le haut.

**Retrait de la poche :**

- Maintenir le support cutané d'une main et, de l'autre main, tirer la poche vers le bas (en s'aidant de la languette) pour la détacher du support cutané.

**Retrait de l'ensemble du système :**

- Retirer simultanément le support cutané et la poche.



Flexima® 3S plaque plate	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
plaque plate (15 - 30 mm)	45 mm	5	936415J	3169125
plaque plate (20 mm)	45 mm	5	936420J	3169133
plaque plate (25 mm)	45 mm	5	936425J	3169141
plaque plate (30 mm)	45 mm	5	936430J	3169158
plaque plate (15 - 40 mm)	55 mm	5	936515J	3169166
plaque plate (35 mm)	55 mm	5	936535J	3169174
plaque plate (40 mm)	55 mm	5	936540J	3169182
plaque plate (15 - 50 mm)	65 mm	5	936615J	3169190
plaque plate (45 mm)	65 mm	5	936645J	3169208
plaque plate (15 - 65 mm)	80 mm	5	936815J	3169216



Flexima® 3S plaque convexe	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
plaque convexe (15 - 26 mm)	45 mm	5	937415J	3169224
plaque convexe (20 mm)	45 mm	5	937420J	3169232
plaque convexe (25 mm)	45 mm	5	937425J	3169240
plaque convexe (15 - 36 mm)	55 mm	5	937515J	3169257
plaque convexe (30 mm)	55 mm	5	937530J	3169265
plaque convexe (35 mm)	55 mm	5	937535J	3169273
plaque convexe (15 - 46 mm)	65 mm	5	937615J	3169281
plaque convexe (40 mm)	65 mm	5	937640J	3169299
plaque convexe (45 mm)	65 mm	5	937645J	3169307



Flexima® 3S colo	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
Mini colo beige	45 mm	30	931245J	3168747
Mini colo beige	55 mm	30	931255J	3168754
Midi colo beige	45 mm	30	931045J	3168689
Midi colo beige	55 mm	30	931055J	3168697
Midi colo beige	65 mm	30	931065J	3168705
Midi colo transparent	45 mm	30	931145J	3168713
Midi colo transparent	55 mm	30	931155J	3168721
Midi colo transparent	65 mm	30	931165J	3168739
Maxi colo beige	45 mm	30	931445J	3168762
Maxi colo beige	55 mm	30	931455J	3168770
Maxi colo beige	65 mm	30	931465J	3168788
Maxi colo beige	80 mm	30	931480J	3168796
Maxi colo transparent	45 mm	30	931545J	3168804
Maxi colo transparent	55 mm	30	931555J	3168812
Maxi colo transparent	65 mm	30	931565J	3168820
Maxi colo transparent	80 mm	30	931580J	3168838



Flexima® 3S iléo Roll'up	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
Mini iléo Roll'Up beige	45 mm	30	932245J	3168903
Mini iléo Roll'Up beige	55 mm	30	932255J	3168911
Midi iléo Roll'Up beige	45 mm	30	932045J	3168846
Midi iléo Roll'Up beige	55 mm	30	932055J	3168853
Midi iléo Roll'Up beige	65 mm	30	932065J	3168861
Midi iléo Roll'Up transparent	45 mm	30	932145J	3168879
Midi iléo Roll'Up transparent	55 mm	30	932155J	3168887
Midi iléo Roll'Up transparent	65 mm	30	932165J	3168895
Maxi iléo Roll'Up beige	45 mm	30	932445J	3168929
Maxi iléo Roll'Up beige	55 mm	30	932455J	3168937
Maxi iléo Roll'Up beige	65 mm	30	932465J	3168945
Maxi iléo Roll'Up beige	80 mm	30	932480J	3168952
Maxi iléo Roll'Up transparent	45 mm	30	932545J	3168960
Maxi iléo Roll'Up transparent	55 mm	30	932555J	3168978
Maxi iléo Roll'Up transparent	65 mm	30	932565J	3168986
Maxi iléo Roll'Up transparent	80 mm	30	932580J	3168994



Flexima® 3S High Flow	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
High Flow beige	55 mm	30	933055J	3169018
High Flow beige	65 mm	30	933065J	3169000
High Flow beige	80 mm	30	933080J	3169026
High Flow transparent	55 mm	30	933155J	3169034
High Flow transparent	65 mm	30	933165J	3169042
High Flow transparent	80 mm	30	933180J	3169059



Flexima® 3S uro	Taille	Pièce/min	Réf. article	CNK
uro beige	45 mm	30	934045J	3169067
uro beige	55 mm	30	934055J	3169075
uro beige	65 mm	30	934065J	3169083
uro transparent	45 mm	30	934145J	3169091
uro transparent	55 mm	30	934155J	3169109
uro transparent	65 mm	30	934165J	3169117